

## CONSEILS POUR VOTRE PHASE PREANALYTIQUE :

### 7 CONSIGNES IMPORTANTES :

- Port de gants obligatoires.
- Assurer vous que le luer soit bien vissé dans le corps de pompe.
- Bien désinfecter le site de ponction.
- Relâcher le garrot lors du remplissage du 1<sup>er</sup> tube.
- Maintenir le tube à l'embase lors du prélèvement.
- Remplir les tubes jusqu'au trait de jauge.
- Homogénéiser les tubes par 5 retournements successifs.



## ORDRE DE PRELEVEMENT :

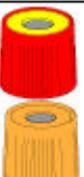
Recommandations CLSI (NCCLS) ; Déc 2003, Doc. H3-A5, et GEHT 2007 ([www.geht.org](http://www.geht.org))

### - AVEC UNE AIGUILLE (ponction franche)

1	2	3	4	5	6 etc...	
Citrate de sodium	Sérum + gel	Sérum	Héparine + gel	Héparine	EDTA	Glycémie
						
						Tous les autres tubes (VS, Aprotinine et ACD sont toujours à prélever en dernier

### - AVEC UNE UNITE DE PRELEVEMENT SECURITE (EPICRAMIENNES):

1 - AVEC flacons d'hémoculture :

1	2	3	4	5	6	7 etc...			
Flacon aérobie	Flacon anaérobie	Citrate de sodium	Sérum + gel	Sérum	Héparine + gel	Héparine	EDTA	Glycémie	Autres
									Tous les autres tubes (VS, Aprotinine et ACD sont toujours à prélever en dernier

2 - SANS flacons d'hémoculture :

1	2	3	4	5	6	7 etc...		
Tube neutre	Citrate de sodium	Sérum + gel	Sérum	Héparine + gel	Héparine	EDTA	Glycémie	Autres
								Tous les autres tubes (VS, Aprotinine et ACD sont toujours à prélever en dernier