


Condition de stockage de la pochette



Conservation au congélateur (- 20°C)
au minimum 12 heures

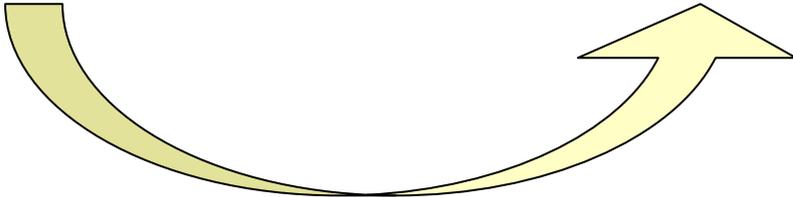

Condition d'utilisation



Sortir la pochette du congélateur et la laisser à
température ambiante durant 15 à 30 mns



Transport

si transport immédiat
par **pneumatique**

si transport différé
(> 15 minutes)

Glisser les prélèvements dans la pochette, **refermer** avec précaution (Velcro®), **insérer** le tout dans une poche kangourou en plaçant le bon de demande sur le **côté du sachet**

Déposer les prélèvements dans la pochette et refermez-la avec précaution

Stocker au **réfrigérateur (+4°C) systématiquement** avant l'envoi au laboratoire (par navette ou par pneumatique), **et** à chaque étape du transport