



ENTRETIEN DES CARTOUCHES DE TRANSPORT

Destinataires : **Unités de soins**
 Réception centralisée
 Laboratoires de la plateforme de Biologie (Cavale Blanche)

1 Objet

Ce mode opératoire a pour but de définir les modalités pratiques d'entretien du parc de cartouches utilisées dans le réseau pneumatique de La Cavale Blanche pour l'acheminement des prélèvements biologiques.

Ce réseau permet :

- l'acheminement des prélèvements biologiques des services de soins vers la réception centralisée du pôle de Biologie-Pathologie
- le retour des cartouches vides de la réception centralisée du pôle de Biologie-Pathologie vers les services de soins, sur le principe de la compensation. Les cartouches sont adressées automatiquement dans les services de soins les plus déficitaires.

2 Cartouches

- Référence : cartouche 80-220 pour tube 110 ou 100
- Matière : polyéthylène haute densité (PEHD)
- Fournisseur : AMS (Automatisme Maintenance Service)

3 Intervenants

- Le personnel des services de soins pour l'entretien régulier des cartouches
- Le personnel de la réception centralisée en cas de contamination accidentelle des cartouches à l'arrivée.

4 Procédure d'entretien régulier

- 2 fois par mois
- Utiliser le détergent-désinfectant de surface disponible dans l'établissement, à la dilution recommandée par le fabricant.
- Rappel : cette solution est à renouveler 1 fois / jour
- Nettoyage humide, à l'aide d'une lavette
- Ne pas rincer, ne pas essuyer